

PLEJUV

ÁCIDO POLILÁCTICO



La nueva generación del
estimulador de colágeno original

VOLUME & BEYOND

El colágeno
Un factor clave

Qué es Plejuv


Presentación: Vial 365mg de polvo.

Composición: 150mg de Ácido Poliláctico, 90mg carboximetilcelulosa de sodio, 125mg de manitol.

Plejuv es el estimulador de colágeno - no elaborado con ácido poli-L-láctico que genera nuevo colágeno en la piel y aumenta el volumen de forma natural con una duración mínima de dos años.


El colágeno es un componente clave para poder disfrutar de una piel sana y joven. Una de las principales razones del envejecimiento es la pérdida de colágeno.

Cuando tenemos veinte años comenzamos a perder el 1% colágeno, entre los cuarenta y los cincuenta, la mayoría de las personas experimentan un mínimo del 20% de pérdida y un máximo del 30%.

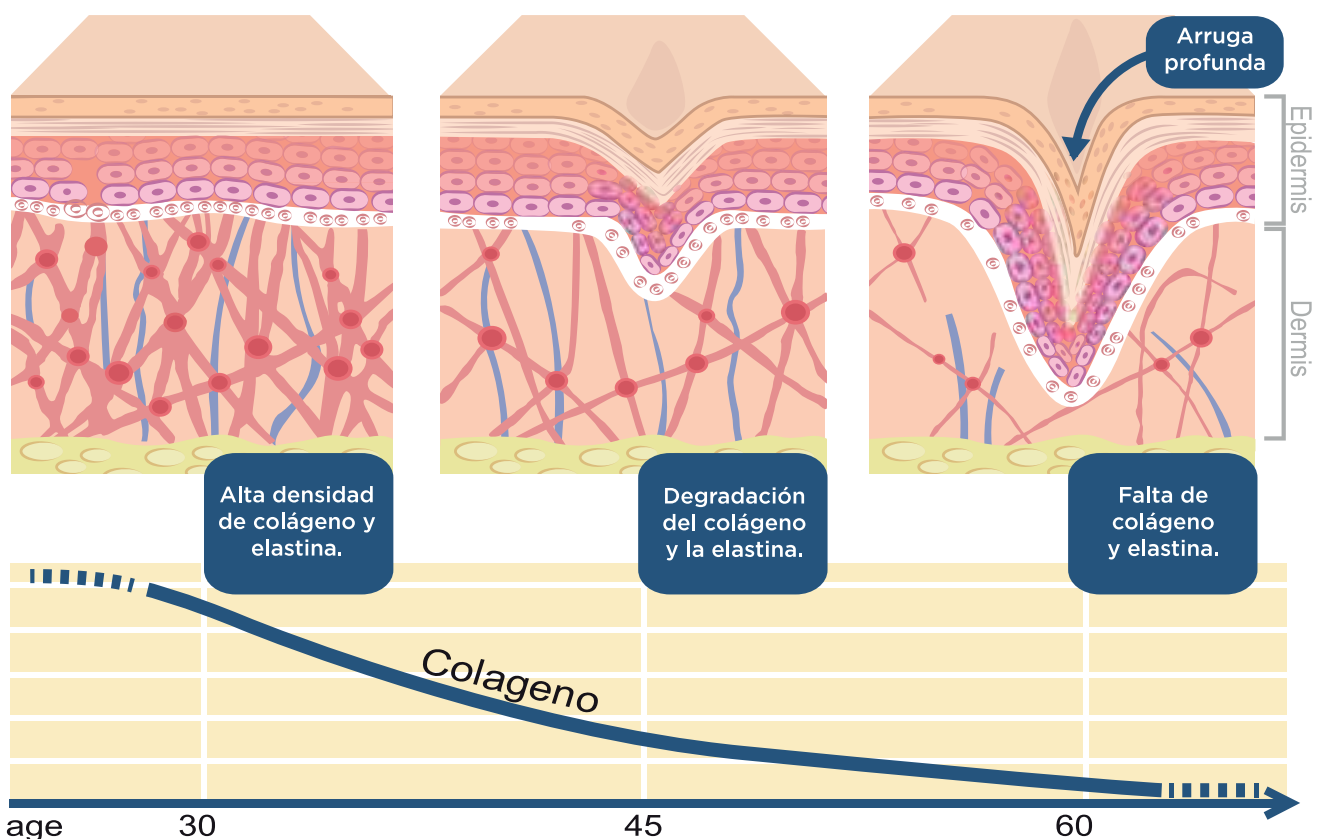

“Relación entre el contenido de colágeno de la piel (expresado por unidad de superficie) y la edad en hombres (a) y mujeres (b). Las mujeres tienen menos colágeno que los hombres en todas las edades, pero la tasa de disminución es la misma en ambos sexos.”


Estimulador de colágeno Plejuv

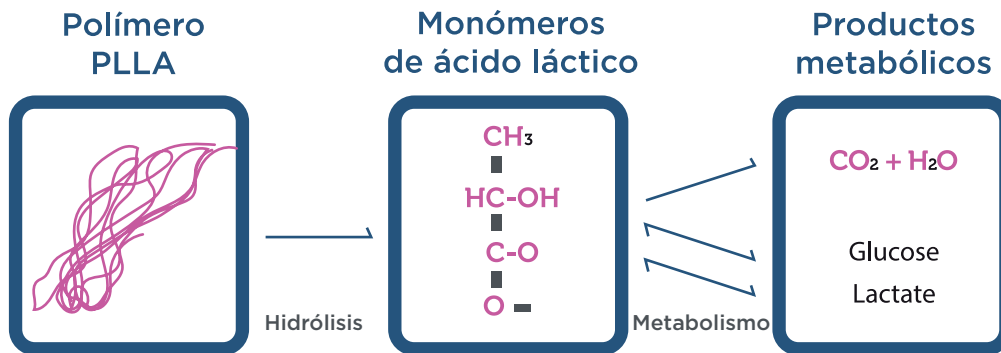

- PLLA (Poly-L-Lactic_Acid) es una materia prima que ha sido aprobada por la FDA de EE. UU. Partícula fina de polímero biodegradable.

- Después de la inyección, el PLLA se metaboliza mediante un proceso metabólico, permanece durante cierto tiempo para luego descomponerse en H_2O , CO_2 y azúcar.

- PLLA (Poly-L-Lactic_Acid) es un polímero de ácido láctico afiliado que existe naturalmente en el cuerpo humano.

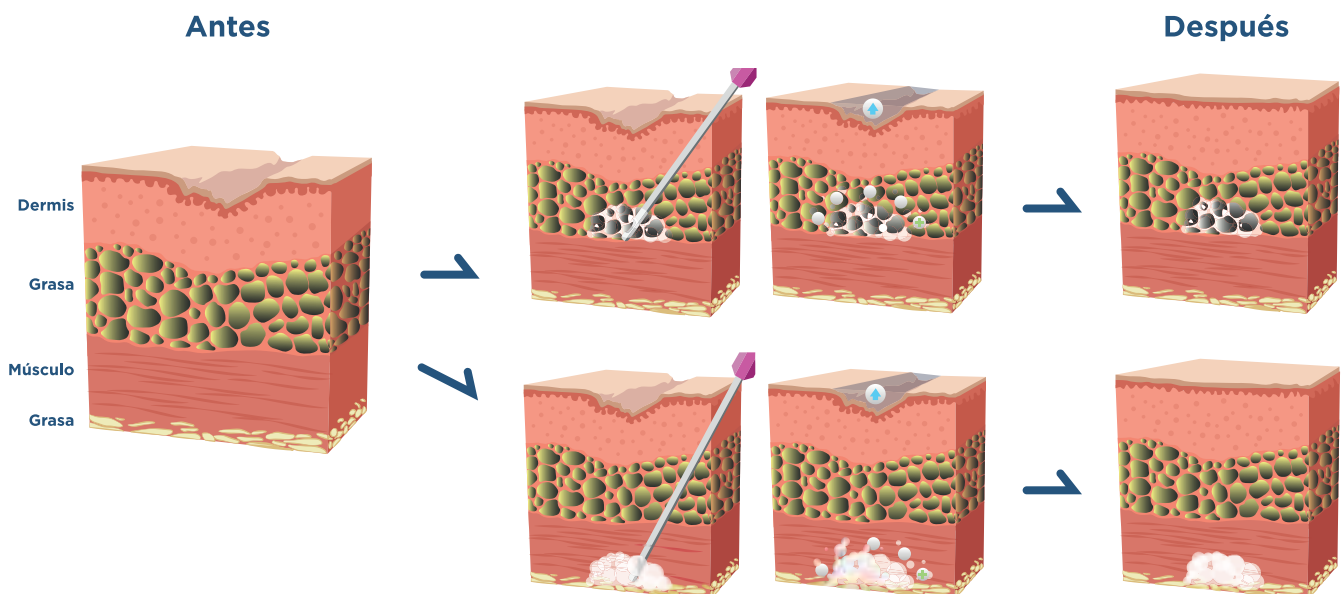



PASO 01

Inyecte Plejuv diluido en la capa subcutánea de la piel.

La mejora de las arrugas se puede ver gracias a la inyección de agua y Plejuv diluido.

PASO 02



PASO 03

A los pocos días, después de absorber el agua, solo quedarán partículas de Plejuv.

Se acumulan nuevas células alrededor de PLLA y fibroblastos en aumento.

PASO 04



PASO 05

El aumento de fibroblastos estimula la generación de colágeno y mejora los pliegues de la piel.

PASO 06


El colágeno generado dura 2 años y las partículas de Plejuv se biodegradan.



CE approved


Plejuv está certificado en Europa
con marcado CE 1434.

Significa que Plejuv ha sido evaluado por el
fabricante y se considera que cumple con los
requisitos de seguridad, salud y protección del
medio ambiente de la Unión Europea.

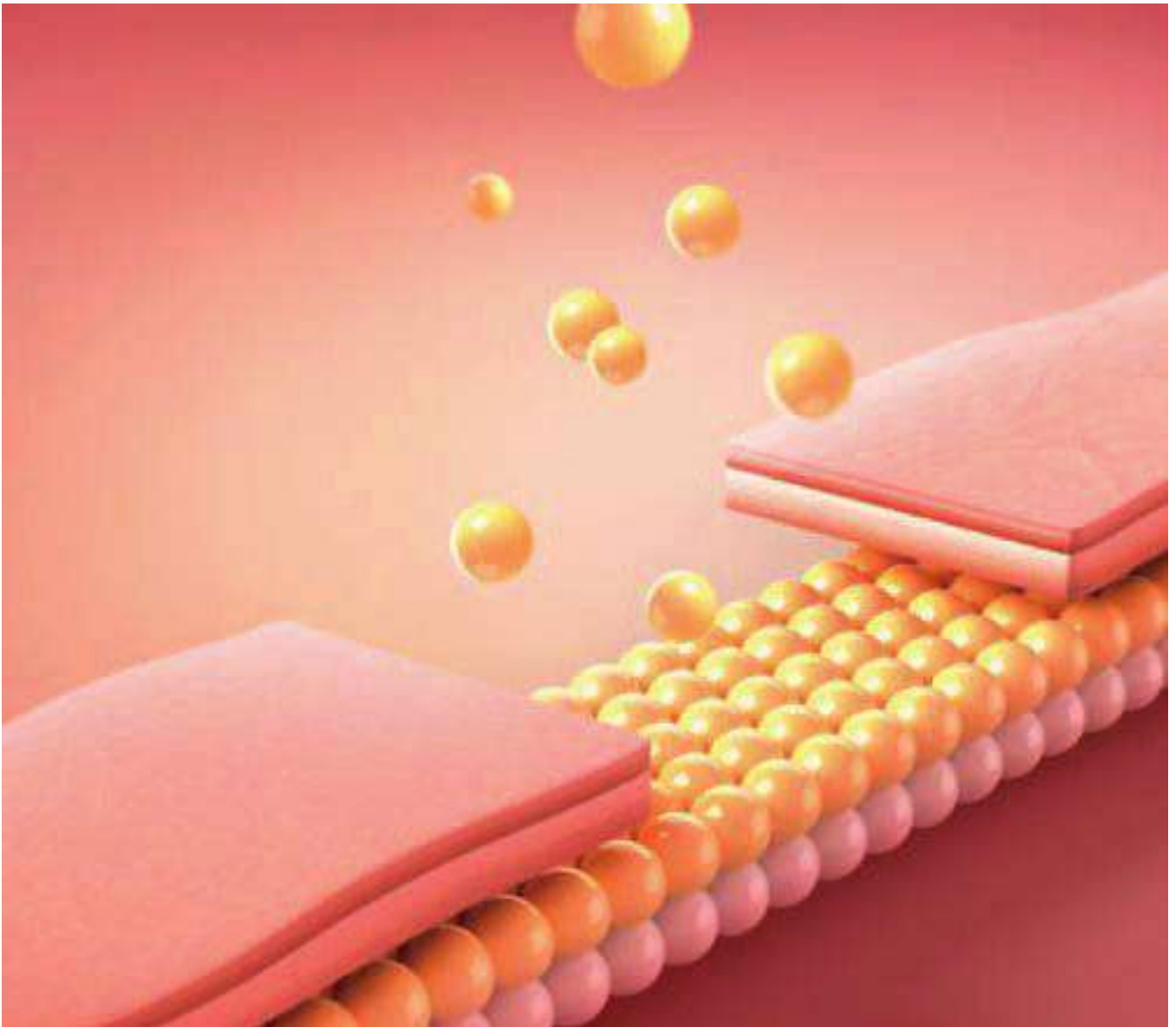


Subcutánea, Inyección de Plejuv en pequeñas áreas para la voluminización y la reabsorción de agua

Técnica en Plejuv

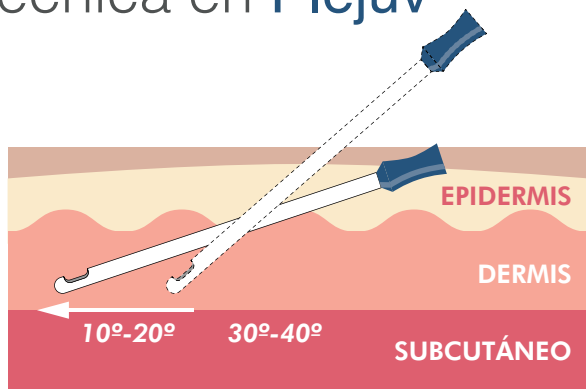


Cuando el comienzo de la cánula está en el plano dérmico profundo, el ángulo de la aguja debe reducirse entre 10 y 20 grados. La cánula deberá avanzar en el plano dérmico profundo paralelo a la superficie de la piel.

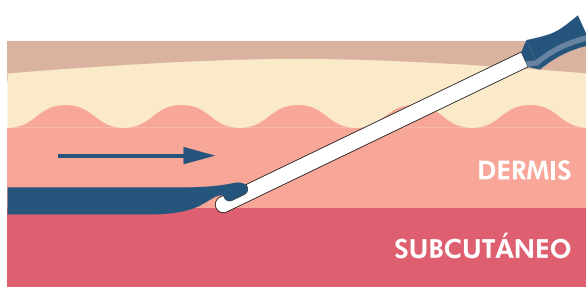

Debemos depositar la mezcla de Plejuv de forma fluida o continuada en paralelo a la superficie de la piel.

Cree un punto de entrada, las inyecciones posteriores deben ser radiales con el punto de origen inicial. La imagen inferior muestra un patrón radial después de completar la última inyección.

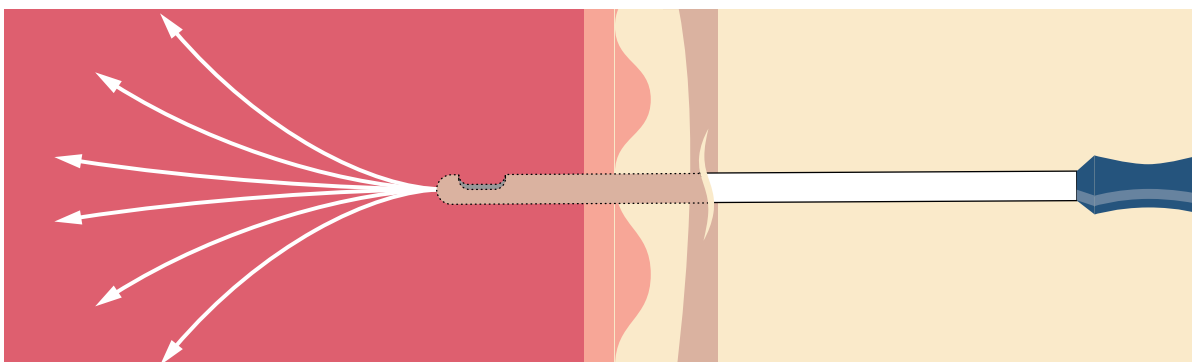

Recomendaciones

1. No inyectar con una cánula inferior a 26G.
2. Durante el tratamiento, mover la solución para mantener una mezcla homogénea.
3. Masajear de forma circular después de 3 o 4 inyecciones para distribuir la mezcla.

Masajear el área tratada durante 1 a 2 minutos antes de continuar con la siguiente área. Pasado el tratamiento: aplique un masaje intensivo durante 5 minutos. Siempre masajes de formas rotativas. En facial masaje intra-oral con 2 dedos a ser posible.

El paciente debe ser consciente de la importancia de masajear las zonas tratadas durante 5 minutos todos los días dos veces al día durante una semana. Aconsejar a los pacientes utilizar cualquier crema hidratante durante el masaje ya que esto hace que el proceso sea más fácil.

Preparación de **Plejuv** para uso **Facial**


Solución de Plejuv en una dilución de 9m.

1 vial de **Plejuv (365mg)**
7ml de **agua bidestilada**
+ 2ml de **lidocaína**

3 jeringas de 3ml cada una
Cánula recomendada 23-25G.

Book **Facial**

Caso clínico 1

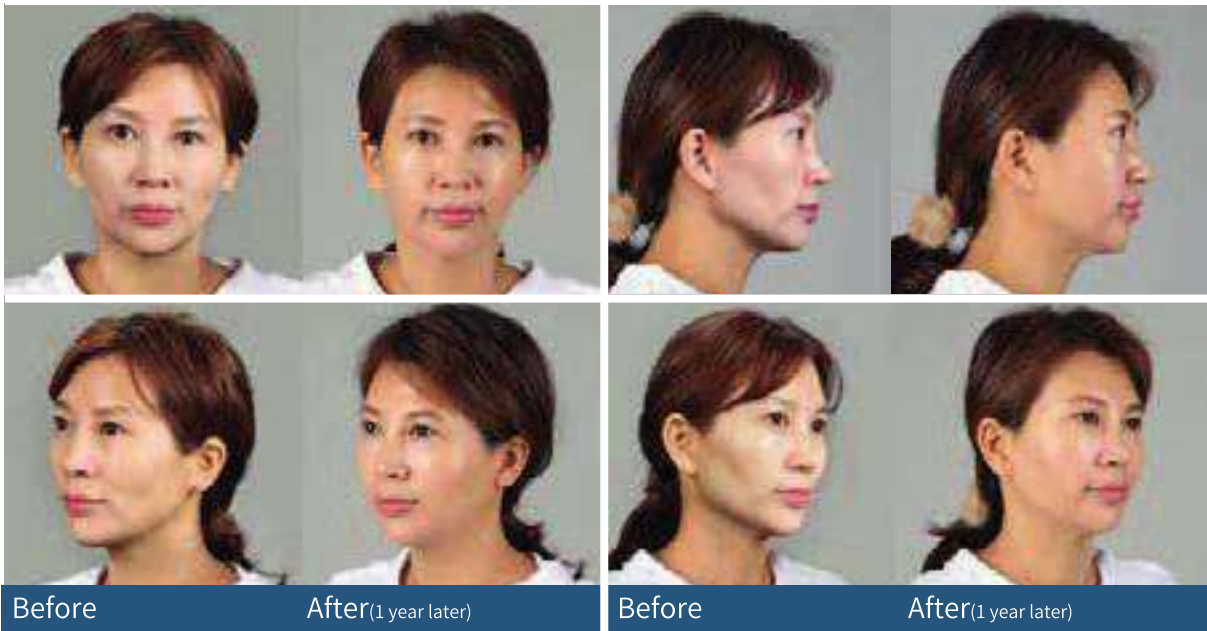

Caso clínico 2



Protocolo

2 ó 3 sesiones espaciadas un mes.

1. No quirúrgico
2. Ingredientes clave: Ácido poli L-láctico (biodegradable)
3. Tiempo de tratamiento: Máximo 30 minutos.
4. Áreas de indicación: Posible tanto para áreas estrechas como anchas.

1/3

Fosa temporal 2-3CC

1/3

Pómulos 2-2.5CC

Nasolabial 2-2.5CC

Líneas de marioneta 1-1.5CC

1/3

2/3

1/3

